

Aggiornamento Vcheck V200

Verifica Versione Software

È ora disponibile una nuova versione di aggiornamento software:

V1.00_R028

Assicurarsi che lo strumento Vcheck attualmente in uso sia aggiornato all'ultima versione, la quale è visibile nel Menu Principale nell'angolo in basso a destra. In caso contrario, si consiglia di effettuare l'aggiornamento seguendo i passaggi indicati.

Aggiornamento Versione Software

1. Scaricare ultimo aggiornamento disponibile dal sito web Isomedic (www.isomedic.com) nella sezione Aggiornamenti,
2. Copiare il file scaricato dalla cartella Download del vostro PC ad una chiavetta USB vuota,
3. Inserire la chiavetta nella porta USB del vostro strumento,
4. Selezionare...IMPOSTAZIONI -> PASSWORD 0000 -> AGGIORNARE -> AGGIORNARE S/W