

Aggiornamento SOLUTION

Verifica Versione Software

È ora disponibile una nuova versione di aggiornamento del software:

DS18

Verificare che la Versione Software attuale, IMPOSTAZIONI → DESCRIZIONE SISTEMA

Aggiornamento Versione Software

1. Scaricare ultimo aggiornamento disponibile dal sito web Isomedic (www.isomedic.com) nella sezione Aggiornamenti,
2. Copiare il file scaricato dalla cartella Download del vostro PC ad una chiavetta USB vuota,
3. Inserire la chiavetta nella porta USB del vostro strumento,
4. Selezionare...IMPOSTAZIONI → IMPOSTAZIONI → AMMINISTRATORE → AGGIORNA SOFTWARE → USB